

HARTMANN

# Lastodur®

Dauerelastische Langzugbinde  
Long-stretch bandage, permanently elastic  
Bande élastique à élasticité longue  
Duurzaam elastische zwachtel  
met lange rek  
Benda con elasticità permanente  
a lunga trazione  
Venda de tracción larga y  
elasticidad permanente  
Ligadura de tracção longa e  
elasticidade permanente  
Trvale elastické obinadlo s dlouhým tahem  
Trvalo elastický obvaz s dlhým ťahom  
Elastyczna opaska o dużej rozciągliwości  
Tartósan rugalmas, hosszú  
megnyúlású pólya  
Эластичный сильнорастяжимый  
бинт длит. действия  
Permanent elastisk binda med  
lång elasticitet  
Højelastisk langstræks kompressionsbind  
Kestöelastinen pitkävenytteen side  
Langstrekkbind med holdbar elasticitet  
長拉力繃帶 永久彈性的  
ضمادة قابلة للمط إلى طول بالغ - ذات مرونة مطاطية دائمة

## Gebrauchshinweise

Lastodur ist eine hautfarbene, dauerelastische Langzugbinde. Es gibt sie in folgenden Ausführungen:

- Lastodur straff/strong: für starke Kompression.
- Lastodur weich/soft: für mittlere Kompression.
- Lastodur light: für leichtere Kompression.
- Lastodur bi-elast: für funktionelle Verbände/Kompressionsverbände.

## Eigenschaften


- Atmungsaktiv, hautverträglich, latexfrei.
- Einzelbinde in geeigneter Verpackung im Autoklaven bei 134° sterilisierbar.
- Dehnbarkeit: straff/strong, weich/soft und light ca. 170 bis 180 %, bi-elast längs ca. 160 %, bi-elast quer ca. 80 %.
- Wirtschaftlich im Gebrauch. Lastodur ist alterungsbeständig, unempfindlich gegen Fette, Salben und Schweiß.
- Lastodur ist latexfrei.

## Anwendungsgebiete

Als Stütz- und Entlastungsverband bei Schädigungen des Haltungs- und Bewegungsapparates sowie als Sportbandage; auch zur Prophylaxe und Nachbehandlung von Venenerkrankungen und zur Druckverstärkung über Verbänden aus textilelastischen Binden geeignet. Lastodur light kann auch als Stütz- und Entlastungsverband für die Stumpfersorgung verwendet werden.

## Hinweise

Wie bei allen Langzugbinden kann es bei unsachgemäßer Anlage zu Abschnürungen, Druckschäden oder anderen Verletzungen kommen.

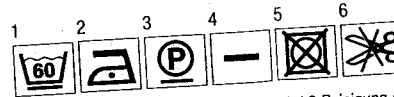

1 Waschen bei 60° C / 2 Bügeln, Stufe 1 / 3 Reinigung eingeschränkt  
4 Liegend trocknen / 5 Kein Trockner / 6 Nicht Schneiden