


**Gebrauchsinformation!**  
**Bitte aufmerksam lesen!**




## Sicherheit für die Dritten. Protefix®

### Protefix® Haft-Polster für Ober- und Unterkieferzahnprothesen


#### Anwendungsinformation

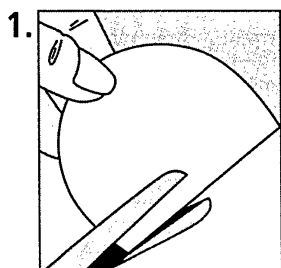


**Oberkiefer-Prothese**  
Bei kleinen Prothesen das Polster mit einer Schere passend zuschneiden (siehe Abbildung).

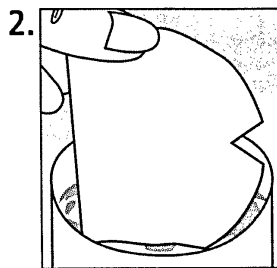


Das Polster 10 Sek. in handwarmes Wasser tauchen und abtropfen lassen.

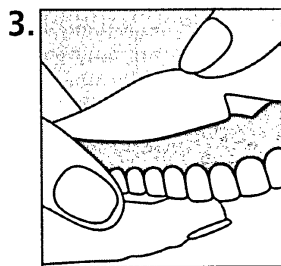


Eine beliebige Seite des Polsters auf die befeuchtete Prothese legen. Die hinteren 2 mm müssen unbedeckt bleiben.

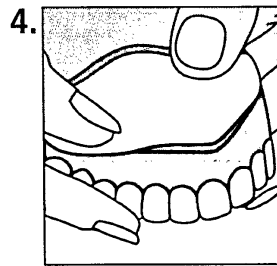

Polster mit beiden Daumen andrücken (in der Mitte beginnend) bis es überall glatt anliegt.

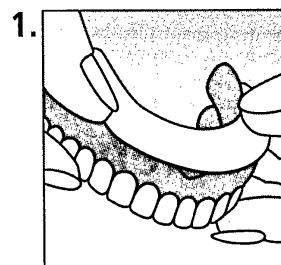

**Unterkiefer-Prothese**  
Bei kleinen Prothesen das Polster passend zuschneiden. Polster anfeuchten und auflegen wie beim Oberkiefer.

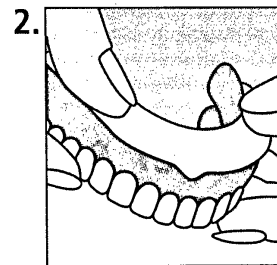

Polster mit Zeigefinger in die Vertiefung der Prothese drücken (in der Mitte beginnend) bis es überall anliegt.

#### Anwendungsgebiete

Haftmittel für Zahnprothesen.

#### Wichtige Hinweise

Nur für Vollprothesen. Nicht für Teilprothesen oder kombinierten Zahnersatz (Cover-Denture, Teleskope, Konuskronen, Anker, Geschiebe etc.). Nur auf der gesunden Schleimhaut anwenden. Aus hygienischen Gründen ist das Protefix® Haft-Polster mindestens einmal täglich zu wechseln. Nach Ablauf des Verfallsdatums nicht mehr anwenden.

Protefix® Haft-Polster möglichst trocken lagern.  
Für Kinder unzugänglich aufbewahren!

#### Zusammensetzung

Vlies bestehend aus Natriumalginat, Viskose-Faser, Polypropylen-Faser.

#### Gegenanzeigen

Überempfindlichkeit gegenüber einem der Inhaltsstoffe.

#### Nebenwirkungen

In Einzelfällen sind Überempfindlichkeitsreaktionen an der Mundschleimhaut oder auch des Gesamtorganismus nicht auszuschließen. Bei Verdacht auf Vorliegen einer Überempfindlichkeitsreaktion nehmen Sie bitte Kontakt mit einem Arzt auf.



  
**Queisser**  
PHARMA

D-24914 Flensburg  
www.queisser.de

Bei Fragen, Problemen oder Anregungen zum Thema Haftmittel schreiben Sie an **Queisser Pharma, Protefix®** Beratungsteam, D-24914 Flensburg. Oder im Internet unter [www.protefix.de](http://www.protefix.de).

## Ihre Meinung ist uns wichtig!

### Wie haben Sie Protefix® kennengelernt?

- Apotheker       Bekannte  
 Zahnarzt       Werbung

### Warum verwenden Sie Protefix® Haft-Polster?

- bei mir hält nichts anderes  
 ich habe (ständig) Druckschmerzen  
 ich habe eine Interimsprothese  
 ich probiere **Protefix® Haft-Polster** gerade aus

### Einige Anmerkungen zur Anwendung:

- das Polster hat die richtige Größe  
 das Polster ist zu groß     zu klein

### Verwenden Sie noch andere Protefix® Produkte?

- Ja, und zwar \_\_\_\_\_  
 nein

Ich bin \_\_\_\_\_ Jahre alt und

verwende **Protefix® Haft-Polster** seit \_\_\_\_\_ Jahren

für den     Oberkiefer     Unterkiefer.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten zum Zwecke der Information erhoben, verwendet und genutzt werden. Die Weitergabe an Dritte mit Ausnahme von Tochtergesellschaften von Queisser Pharma ist ausgeschlossen.

Datum / Unterschrift \_\_\_\_\_

Bitte senden Sie diesen Abschnitt an: Queisser Pharma, D-24914 Flensburg. Wir nutzen Ihre Angaben streng **vertraulich** zur ständigen Produkt-Verbesserung. Bei Anfragen Ihrerseits setzen wir uns gerne mit Ihnen in Verbindung. Wenn Ihnen die telefonische Beantwortung recht ist, geben Sie bitte Ihre Telefonnummer an.

Name \_\_\_\_\_

Straße \_\_\_\_\_

PLZ, Ort \_\_\_\_\_

Telefon \_\_\_\_\_



## Leiden Sie öfter unter schmerzhaften Druckstellen, Entzündungen der Mundschleimhaut oder Aphthen? Dafür gibt es **Protefix® Wund- und Schutzgel**.

**Protefix® Wund- und Schutzgel** ist eine aktuelle Problemlösung aus der **Protefix®** Forschung. Es hilft bei schmerzhaften Entzündungen der Mundschleimhaut, Prothesen- und Zahnsparngendruckstellen oder Aphthen mit einem neuartigen Wirkprinzip:

Sein patentierter Wirkstoff „TGO“ (oxydierte Glyceroltriestere) wird durch ein besonderes Verfahren aus speziellen Pflanzenölen gewonnen und bildet bei der Anwendung einen Schutzschild, der – das ist das Neuartige! – selbst auf der Mundschleimhaut gut haftet.

- Er schützt die Wunde vor chemischen Reizen und dem mechanischen Druck der Zahnsparngendruckstelle oder der Prothese,
- lindert den Schmerz,
- fördert die Wundheilung.
- Kein Brennen oder Taubheitsgefühl auf der Mundschleimhaut.



**Protefix® Wund- und Schutzgel** gibt es nur in der Apotheke unter der PZN 2 651 753.