

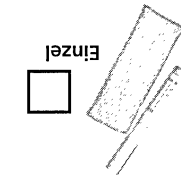
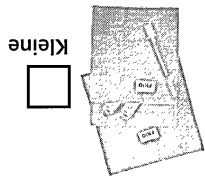
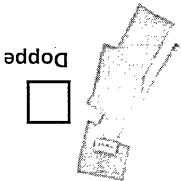
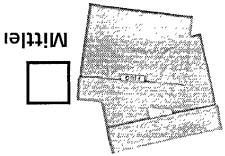
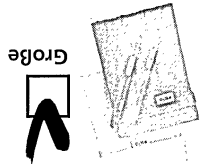
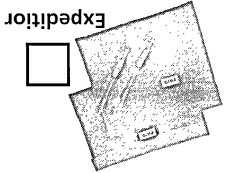


## Insulin Reisetasche

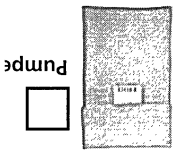

- HÄLT IHR INSULIN VIELE TAGE KÜHL
- BRAUCHT WEDER STROM NOCH KÜHLELEMENTE
- WIRD NUR MIT WASSER AKTIVIERT
- IST SEHR OFT WIEDERVERWENDBAR

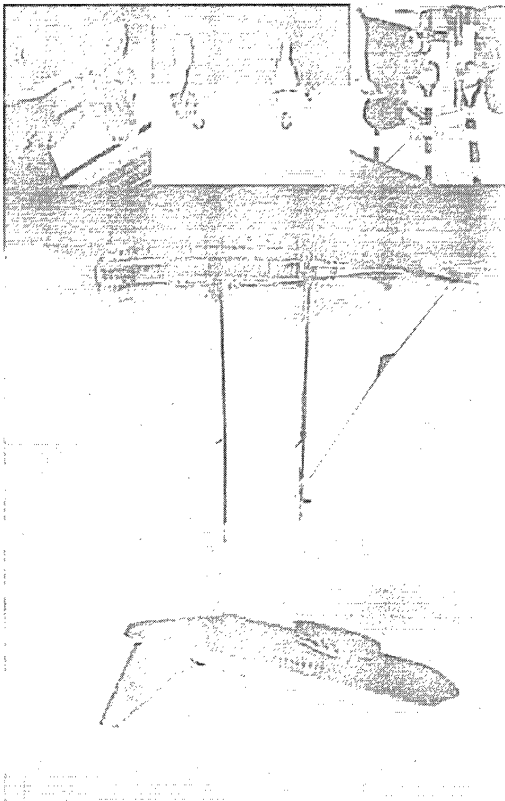

ASTRID EURO

# FRIO®

# FRIO®


ASTRID EURO

## INSULIN REISETASCHE BEDIENUNGSANLEITUNG

**Willkommen!**

FRIO's ist für die Bedürfnisse insulinabhängiger Diabetiker entwickelt worden, damit diese Ihr Insulin bei unterschiedlichen Außen-Temperaturen sicher aufbewahren können.

Lesen Sie sorgfältig diese Bedienungsanleitung um genau zu verstehen, wie Sie die FRIO Tasche gebrauchen sollten.

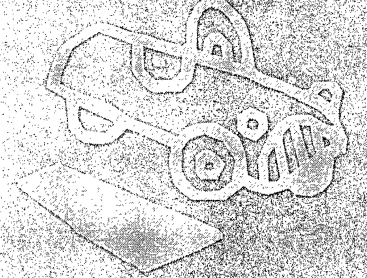

## **Inhalt**

Jedes Paket besteht aus zwei Teilen:

1. Cambrelle® Außen-Tasche
2. Innen-Tasche aus Baumwolle hergestellt, hat Fächer angefüllt mit Kristallen.

## **Gebrauchsanweisung**

1. Schütteln Sie gleichmäßig die Kristalle in den Fächern der Innen-Tasche.

2. Tauchen Sie die Innen-Tasche völlig unter Wasser. Abhängig von Ihrem gekauften FRÍO Modell sind folgende Eintauchzeiten zu beachten:

**Einzel, Doppel und Pumpen - 8 Minuten;  
Kleine und Mittlere - 10 Minuten;  
Große - 12 Minuten; Expedition - 15 Minuten.**

3. Diese Kristalle verändern sich in ein Gel, das nicht zu starr sein sollte, sondern biegsam. Falls die FRÍO zu starr für den bequemen Gebrauch ist, müssen Sie die Innen-Tasche so lange trocknen lassen, bis sie wieder leicht biegsam ist.

4. Nehmen Sie die Innen-Tasche aus dem Wasser und lassen Sie diese für 10 Minuten liegen. Das geformte Gel nimmt weiterhin die Feuchtigkeit des Baumwoll-Materials auf. Die Fächer schwellen noch ein wenig mehr an.

5. Stecken Sie das Insulin vom Kühlschrank in die Innen-Tasche und diese selbst in die Cambrelle® Außen-Tasche.

## **Dauerhafter Gebrauch**

Die FRIO Innen-Tasche nur dann ins Wasser eintauchen, wenn sich das Gel zurück in fühlbare Kristalle verändert. Wenn Sie die Tasche ständig brauchen, dann sind die Eintauchzeiten kürzer, zB 4-5 Min.

## **Umgehen mit Ihrer FRÍO**

Ihre aktivierte FRÍO NICHT für lange Zeit in einen luftdichten Behälter stecken. FRÍO wirken durch ein Verdunstungssystem und benötigen deshalb Kontakt mit der Luft. Das Tragen als Handgepäck, im Rucksack und Koffer ist normalerweise problemlos, aber nach 24 Stunden sollte man die FRÍO herausnehmen. Legen Sie niemals Ihre FRIO Tasche in den Kühlschrank!

## **Lagerung**

Wenn Sie die Tasche nicht gebrauchen, Innen-Tasche von der Cambrelle® Außen-Tasche trennen. Auf natürliche Weise sollte die Innen-Tasche austrocknen, bis sich das Gel wieder zu Kristallen bildet. Schütteln Sie die Tasche während sie austrocknet, damit die Kristalle nicht zusammenkleben. Wenn die Innen-Tasche völlig trocken ist, können Sie die Tasche weglegen. Nach einigen Jahren in Gebrauch müssen Sie die FRIO Tasche dementsprechend länger ins Wasser tauchen. Solange sich die Kristalle in Gel umwandeln, ist die FRIO Tasche zu gebrauchen. Wenn die Kristalle sich nicht in Gel umwandeln, brauchen Sie eine neue Tasche!

Viel Vergnügen!

**FRIO**

**Postfach 2105**

**36243 Niederaula**

**Kostenlose Info-Tel: 08 00 1 81 74 50**

**Fax: 00 44 13 48 83 75 54**

**www.frio.nl**