

Gebrauchsinformation

Serag-Wiessner KG
Zum Kugelfang 8 - 12
95119 Naila

LAVANID® 1 und LAVANID® 2

Bezeichnung

LAVANID® 1 und LAVANID® 2

Beschreibung

LAVANID® 1 und LAVANID® 2 sind sterile, iso-osmotische Wundspüllösungen auf Basis der Ringer-Lösung DAB 7 mit 0,02% bzw. 0,04% Polyhexanid. Der Zusatzstoff Polyhexanid unterstützt die Wundspülung bzw. -behandlung durch seine dekontaminierenden und konservierenden Eigenschaften.

Zusammensetzung

1000 ml Spüllösung enthalten:

	LAVANID® 1	LAVANID® 2
Natriumchlorid	8,600 g	8,600 g
Kaliumchlorid	0,300 g	0,300 g
Calciumchlorid 2 H ₂ O	0,330 g	0,330 g
Polyhexanid-HCl	0,200 g	0,400 g

STERILE

CE1275

Weitere Bestandteile:

Macrogol
Aqua ad iniectabilia

Packungsgrößen

Inhalt einer Plastikflasche: 250 bzw. 1000 ml

Anwendungsgebiete

- Lösung zur lokalen Wundspülung und -reinigung
 - zum Befeuchten von Tüchern, Tamponaden und Verbänden
-

Gegenanzeigen

LAVANID® 1 und LAVANID® 2 Spüllösungen dürfen nicht angewendet werden:

- im gesamten Bereich des ZNS (auch der Meningen)
- bei Spülungen im Bereich von Knorpeln und Gelenken
- im Mittel- oder Innenohr
- zur intraperitonealen Spülung
- bei bekannter Überempfindlichkeit gegen Polyhexanid
- bei antiseptisch vorbehandelten Wunden oder Anwendung lokaler Antibiotika
- bei Schwangerschaft und Stillperiode

Über die Anwendung bei Kleinkindern und Säuglingen liegen bislang keine Erfahrungen vor. LAVANID® sollte daher nur bei zwingender Indikationsstellung eingesetzt werden.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise

Nicht zur Injektion oder Infusion verwenden. Nicht mit Zusätzen mischen. Unter Einhaltung aseptischer Bedingungen kann die Spüllösung mit Hilfe eines Spikes entnommen werden. Die Lösung sollte jedoch innerhalb von 4 Wochen aufgebraucht werden.

Alternativ kann zum Ausgießen der Lösung die Schraubverschluss-Kappe abgenommen werden. In diesem Fall soll die Lösung in einem Arbeitsgang aufgebraucht werden.

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln

Die Kombination von PVP-Jod-Präparaten (z.B. präoperative Hautdesinfektion) mit intraoperativer LAVANID® 1 und LAVANID® 2 - Spülung sollte vermieden werden.

Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung

Zur Wundspülung bei chirurgischen Eingriffen sowie bei diagnostischen und therapeutischen Maßnahmen, die eine Spülung bzw. Feuchthaltung nötig machen. Soweit nicht anders verordnet, richtet sich die Dosierung nach den Erfordernissen des Eingriffs. Die Dauer der Anwendung ist auf den jeweiligen Eingriff begrenzt.

Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit

Bei Raumtemperatur lagern (15 - 25°C).

Nach Ablauf des Verfalldatums nicht mehr verwenden!

Nicht resterilisieren!

Nur klare Lösungen in unversehrten Behältnissen verwenden!

Erläuterung der Symbole auf der Verpackung



Hinweis: Gebrauchsinformation beachten!



Steril, solange die Verpackung unbeschädigt und ungeöffnet ist.
Sterilisationsmethode: Hitze



CE-Zeichen und Identifikationsnummer der Benannten Stelle.
Das Produkt entspricht den grundlegenden Anforderungen der Richtlinie des Rates über Medizinprodukte 93/42/EWG.

Hersteller

Serag-Wiessner KG
Zum Kugelfang 8 - 12
95119 Naila
Telefon (0 92 82) 93 7-0
Telefax (0 92 82) 93 7-93 69

Stand der Information

Februar 2007

I3794AAB