


fittydent[®] SUPER *Wasserunlösliche*
Haftcreme
 Haftcreme für Dritte Zähne

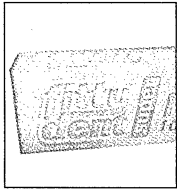

Extrem starke Haftkraft

fittydent ist die einzige wasserunlösliche Haftcreme für die dritten Zähne. Mit extrem starker Haftkraft sitzt die Zahnprothese sicher einen ganzen Tag lang am Kiefer fest. Denn die wasserunlösliche *fittydent* Haftcreme wird beim Essen oder Trinken nicht ausgespült und vermittelt dadurch ein völlig neues Zahnprothesengefühl.

fittydent[®] SUPER **Hafteinlagen**
 Extra starker Halt für Unterkieferprothese



fittydent super Hafteinlagen sind speziell für die kleinere und häufig gering ausgeformte Auflagefläche im Unterkieferbereich entwickelt worden. Die patentierte Haftkraft von *fittydent* sorgt so auch hier für eine zuverlässige Langzeitfixierung.

fittydent super Hafteinlagen sind nicht wasserlöslich und daher auch bei starkem Speichelfluß wirksam und sicher.

fittydent[®] SUPER **Reinigungs-**
tabletten

GEBRAUCHSINFORMATION

Jede Zahnprothese benötigt sorgfältige Pflege: Sie muß gründlich, aber auch gleichzeitig schonend sein und darf die Zahnprothese nicht angreifen oder zersetzen. Durch die pH9-Formel erfüllen die *fittydent* super Reinigungstabletten diese Ansprüche. Sie befreien die Zahnprothese schonend von Verunreinigungen und Rückständen. Nur *fittydent* super Reinigungstabletten entfernen die wasserunlöslichen Rückstände der *fittydent* Haftcreme!

Der strahlende Glanz und die hygienische Frische Ihrer dritten Zähne sind der Lohn für Ihre Entscheidung, *fittydent* super Reinigungstabletten zu verwenden.


**Kraftvolle Reinigung
 und schonende Pflege
 mit der pH9-Formel!**



***fittydent* - die beste Wahl für Ihre dritten Zähne**

BZ0232DE0006


fittydent super Reinigungstabletten

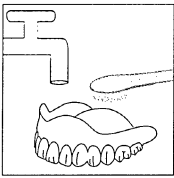

1. Wenn Sie Ihre Prothese aus dem Mund genommen haben, reinigen Sie diese


unter fließendem Wasser mit einer Bürste.

2. Legen Sie die Prothese in ein Glas warmes Wasser und geben Sie 1 Tablette dazu. (Umrühren nicht notwendig.) Achten Sie darauf, daß die Prothese

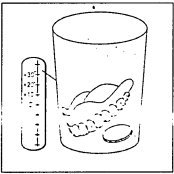


vollständig von der Reinigungslösung bedeckt ist.

3. Wenn Sie **fittydent** super Reinigungstabletten täglich

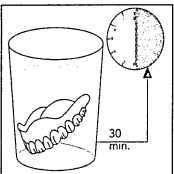


anwenden, sind die hygienische Reinigung und die Entfernung der wasserunlöslichen Haftcremerückstände nach ca. 30 Minuten abgeschlossen.

HINWEIS: Falls Sie **fittydent** super Reinigungstabletten nicht täglich anwenden, muß die Prothese

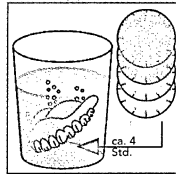

mindestens drei bis vier Stunden in der Reinigungslösung bleiben. Die Prothese kann aber auch über Nacht im Reinigungsbad verweilen.

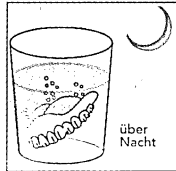

Die sanfte Reinigungswirkung der **fittydent** Tabletten löst die Rückstände ohne mechanische Einwirkung in allen Winkeln der Prothese. Selbst Kalkablagerungen (Zahnstein) sowie hartnäckige Flecken von Kaffee und Nikotin werden bei regelmäßiger Anwendung verhindert bzw. beseitigt.


Glanz und Frische für die dritten Zähne

fittydent super Reinigungstabletten

HINWEIS: Nur **fittydent** super Reinigungstabletten entfernen die wasserunlöslichen Rückstände der **fittydent** super Haftcreme bzw. der **fittydent** super Haftenlagen.

4. Abschließend nehmen Sie die Prothese aus dem Glas wieder heraus und spülen diese unter fließendem Wasser gut ab.

5. Bevor Sie wieder **fittydent**

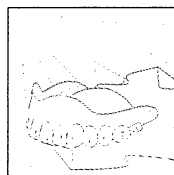

super Haftcreme oder **fittydent** super Haftenlagen verwenden,

trocknen Sie die Prothese gut ab.

HINWEIS: Mit **fittydent** super Reinigungstabletten können Sie alle herkömmlichen Zahnprothesen und Zahnspangen reinigen. Die regelmäßige Reinigung garantiert, daß auch die fast unsichtbaren Rückstände entfernt werden und **fittydent** seine volle Haftkraft wieder entfalten kann.

Ein TIP: Falls Ihre Zahnprothese nicht sicher hält, sollten Sie **fittydent** super Haftcreme bzw. **fittydent** super Haftenlagen (bei speziellen Problemen mit der Unterkiefer-Zahnprothese) verwenden.

Lagerung bei Raumtemperatur!

Zusammensetzung: Sodium Perborate, Sodium Bicarbonate, Potassium monopersulfate, Trisodium Phosphate, PEG-240, Sulfamic acid, PVP, TAED, Silica, Sodium Methyl Oleoyl Taurate, Cellulose-Lactose, Colour C.I. 42090, Aroma



Füllmenge technisch bedingt.

Hersteller:

Fittydent International GmbH,
A-7423 Pinkafeld, Austria
www.fittydent.com

Vertrieb:

Börner GmbH, 12347 Berlin